



BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-GEAR® Мобильный сервис



BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



содержание

- Преимущества использования BT gear
 - Использование в кабинете
 - Мобильное использование
- bt-GEAR®: каждый инструмент
- показания/противопоказания
- продукты
- услуги
- бизнес





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.




Какое преимущество bt-GEAR®?

В кабинете



Мобильный сервис

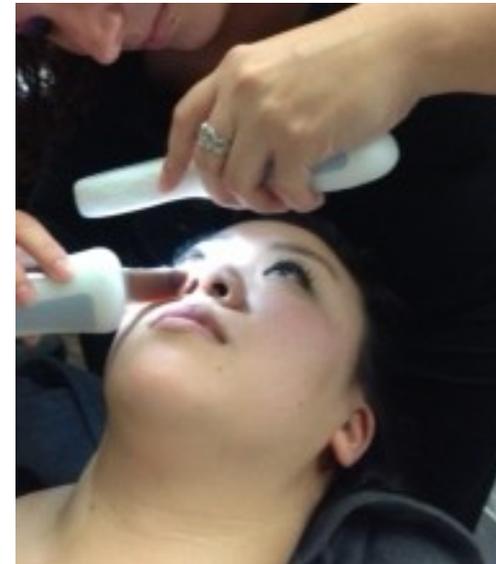



BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



Кабинет косметологии

- Для использования в комплексных процедурах
- Оценка состояния кожи во время процедуры
- На завершающем этапе процедуры

bt-GEAR®

On the go...

- Многогранность и легкость в использовании
- Позволяет осуществлять процедуры в очень короткий промежуток времени
- Незамедлительный результат



BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



Важнейшее в bt-GEAR®

1. Визуальная оценка: bt-vision®
2. Оценка увлажнения: bt-analyze®
3. 5X увеличение: bt-zoom®
4. Эксфолиация и использование продуктов: bt-micro®
5. микротоки: bt-nano®





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-vision

See Clear. Be Clear

- Позволяет проводить точную оценку во время консультации и процедуры
- Позволяет проводить оценку кожи для увеличения розничных продаж косметических средств
- Может заменить функцию лампы лупа





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-vision

See Clear. Be Clear

- Работает от батареи 3 AAA
- четкий LED свет
- Увеличительные стекла 1.2X
1.8X 2.5X 3.5X
- Удобство замены стекол
- Изменение яркости света
- Максимальный комфорт
фиксации застежки для работы
в течении всего дня
- Небольшой вес





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-analyze

Skin Identification

- bt-analyze® компактное устройство для измерения влаги кожи
- Использование в bt-analyze® технологии биоэлектрического импеданса
- bt-analyze® хранит до 7 измерений на экране





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-analyze

Skin Identification

- Уровень влаги замеряется всей плоскостью электрической пластины в отличие от других анализаторов, где замер проводится из двух отдельных точек
- Технология определяет уровень проводимости тока тканями и уровень сопротивления. Также определяется количество времени, необходимое для прохождения по электрической схеме.
- $\text{проводимость} - \text{сопротивление} / \text{время} = \text{уровень влаги}$





BIO-THERAPEUTIC


skin care for life inside and out.



bt-analyze

Skin Identification

- Мы рекомендуем проводить исследование до и после процедуры на очищенную кожу
- Заносить данные в индивидуальную карту пациента
- Уровень влаги колеблется от 0 до 65
- измерение 20 или ниже может свидетельствовать о чрезмерной сухости кожи
- измерение 35 является оптимальным
- измерение 55 свидетельствует о высоком уровне влаги в коже

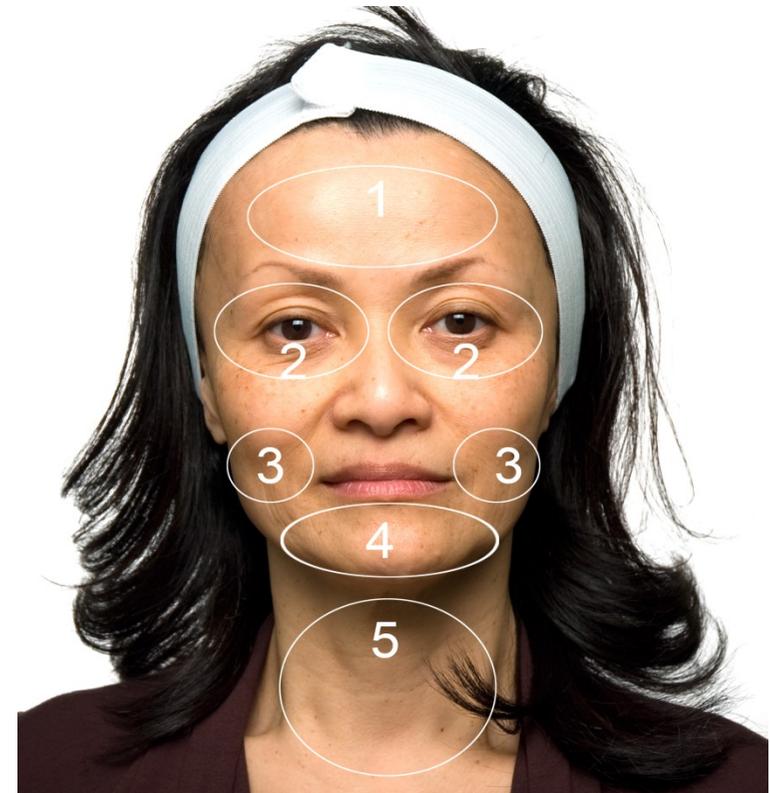



BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-analyze

Skin Identification

- КОМПАКТНЫЙ
- Минимальный вес
- На батарейках – 2 AAA
- Защитный чехол
- легко помещается в bt-techbelt™





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-zoom™

- Идеален в использовании для мгновенной оценки.

Для использования в оценивании кожи

- Ультрафиолет работает как мини лампа Вуда

Легкость использования. The bt-zoom™ предполагает только включение LED света

- простота использования. Очистка линзы мягкой тканью и замена батареек по необходимости

- дезинфекция. Очистка и дезинфекция средствами разрешенными минздравом





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-zoom

- Работа без сети
- Увеличение до 5x
- чистый LED свет
- Удобство использования в консультациях
- на 3 AAA батарейках
- Легко помещается в techbelt





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-zoom

Применение УФ:

Цвета свечения и состояния кожи для их получения лампой следующие:

- Тонкая, обезвоженная кожа – фиолетовый/сиреневый
- Акне и комедоны – желтый/оранжевый
- гиперпигментация – коричневый
- гипопигментация (отсутствие пигмента) – голубой/белый
- Ороговевшие кератиноциты – белый





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



ИССЛЕДОВАНИЕ В МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЯХ

bt-zoom

bt-vision™

See Clear. Be Clear



bt-analyze™
Skin Identification



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОЧНОЙ ОЦЕНКИ



BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-micro™

bt-micro® представляет мощную комбинацию двух популярных технологий: микротоковой терапии и ультразвука для эксфолиации, очистки и проведения продуктов





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-micro™

bt-micro® имеет 4 различных режима работы, каждый режим позволяет проводить процедуры на высоких и низких уровнях интенсивности

EXFOL работа ультразвука

SERUM Комбинация ультразвука и микротоковой терапии

*** подходит для сывороток и ампул*

CREAM Комбинация ультразвука и микротоковой терапии

*** подходит для работы по крему*

CLEAR Комбинация ультразвука и микротоковой терапии

*** подходит для дезинкрустации и омыления перед экстракцией*






BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-micro™

bt-micro® Exfol Mode работа ультразвука высокой частоты (до 26,000 Hz) при помощи плоской металлической лопатки при удерживании ее под углом 45 градусов для удаления омертвевших частиц

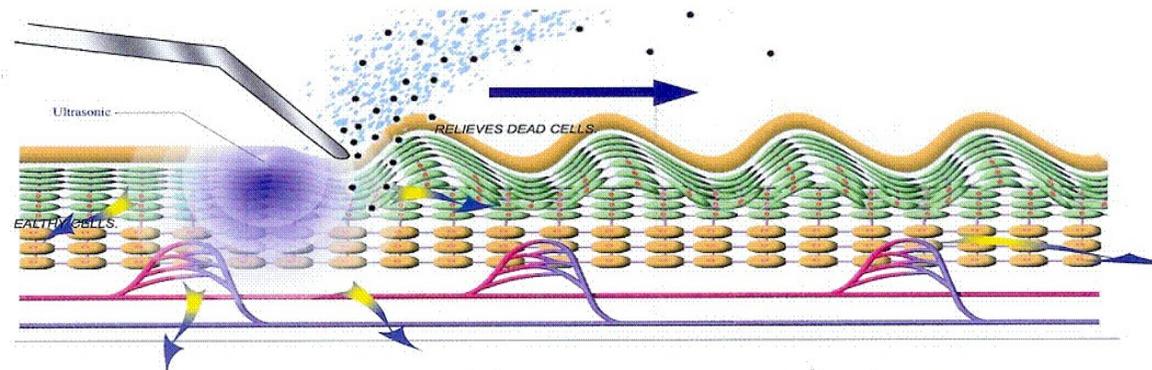




BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-micro[®] Exfoliation

Пьезоэлектрический эффект ультразвука генерирует вибрацию, которая отделяет ороговевшие частицы под силой ультразвуковой волны

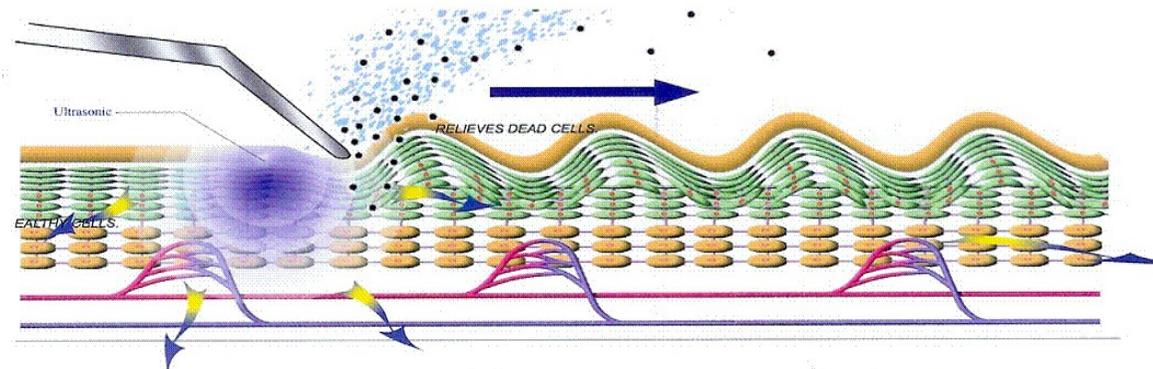



BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



bt-micro™

Быстрое колебание вызывает эффект кавитации. Кавитация происходит когда водорастворимые молекулы взрываются на поверхности кожи
Используя bt-micro® лопатку в направлении по ходу движения можно проводить легкое неинвазивное мягкое очищение кожи.





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-microTM

Продукты которые используются с bt-micro®

EXFOL MODE: **EXFOLIATE**

С протеолитическими ферментами папаи и гранулами жожоба или AQUAfuse очищающую пену



CLEAR MODE: **DECONGEST**

Для дезинкрустации, содержит бромид цитрамония как разрыхлитель

SERUM и CREAM MODES: **bt-Cocktail**® три части энергетической системы с инновационными ингредиентами на рынке косметологии сегодня





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-micro™

- Вес меньше 200 гр
- Компактная и удобная форма
- Работа от аккумулятора
- Идеально подходит для bt-techbelt™
- Можно использовать в любом уходе по лицу
- Высокая частота ультразвука 26,000 Hz за секунду





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-nanoTM



Заклучительный и наиболее значимый продукт из семьи
минисервиса микротоки **bt-nano**[®]



BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



Что такое микротоки?

- микротоковая терапия это терапия токами в в микродиапазоне которые имитируют уровень электрического импеданса биологической ткани.
- стимулируют выработку АТФ





BIO-THERAPEUTIC


skin care for life inside and out.



ЧТО ТАКОЕ АТФ или аденозинтрифосфат?

АТФ всегда ассоциируют с «энергией жизни» Она является источником всей клеточной активности

Исследования показывают что здоровый человеческий организм использует ее эквивалент для поддержания основных функций

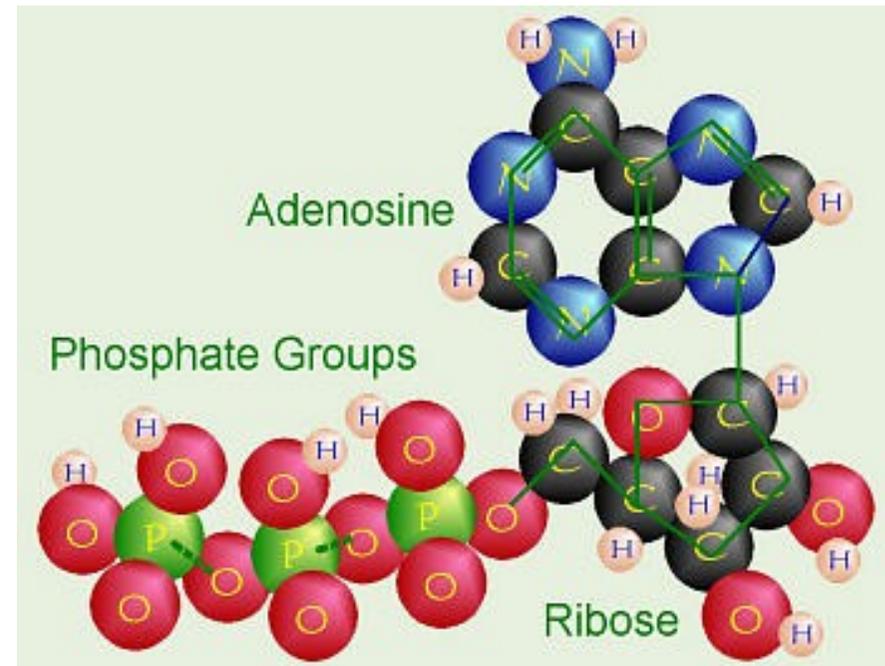



BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



МИКРОТОКИ

Независимая тестовая оценка

- уровень АТФ повышается от 300% до 500%
- Улучшение общего состояния и заживляющих свойств тканей
- Объективно придает коже молодость
- Поддерживает длительность мышечного тонуса muscle re-education

КОЛЛАГЕН

На 14%
увеличение
плотности
коллагенового
каркаса после 20
дней процедур

ЭЛАСТИН

На 48%
увеличение
количества
эластиновых
волокон после 20
дней процедур



BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



Suzuki Sequencing®

Suzuki Sequencing® is патентованная технология которая позволяет мультчастотам увеличивать эффективность микротоков КОЖИ

US005817138A

United States Patent [19] [11] Patent Number: **5,817,138**
 Suzuki [45] Date of Patent: **Oct. 6, 1998**

[54] **MULTI-CHANNEL, INTERFERENTIAL WAVE, MICRO CURRENT DEVICE AND METHODS FOR TREATMENT USING MICRO CURRENT**

[76] Inventor: **James Y. Suzuki**, 5766 S. Oaklawn Pl., Seattle, Wash. 98118

[21] Appl. No.: 758,637
 [22] Filed: **Nov. 27, 1996**

[51] Int. Cl.⁵ A61N 1/36
 [52] U.S. Cl. 607/67
 [58] Field of Search 607/66, 67, 68, 607/69, 70, 71, 72

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS
 5,285,781 2/1994 Brodard 607/66
 5,324,317 6/1994 Reiss 607/67

OTHER PUBLICATIONS
 Cheng, et al. Arch. Dermatol. vol. 129, pp. 264-271 (1993).
 Wood, et al. Arch. Dermatol. vol. 129, pp. 999-1008 (1993).
Primary Examiner—Scott M. Getzow
Attorney, Agent, or Firm—George W. Neuner

[57] **ABSTRACT**
 An interferential wave, micro current device is disclosed. The device typically has a power supply, a frequency generator, a pulse generator, a pulse envelope generator, an electrical current controller, and four or more channels for applying micro amperes of electrical current to patient tissue. Each channel has two electrodes for completing a micro current electrical circuit through patient tissue. The controller provides a controlled amount of current in each channel from about 20 micro amperes to about 200 micro amperes at a frequency up to about 300 Hertz. Also disclosed are methods for treating lymphedema, edema, fibrosis and fibromyalgia by application of interferential wave form micro current.

30 Claims, 28 Drawing Sheets

The diagram shows a timing sequence for the Suzuki Sequencing technology. It features a horizontal axis labeled 'Time' and a vertical axis with markers for V+, 0, and V-. The sequence consists of a series of pulses. A 2.0 second interval is marked between the start of the first pulse and the start of the second pulse. Within this 2.0 second interval, there are four pulses. The interval between the first and second pulse is marked as 0.5 seconds. The diagram shows a positive voltage (V+) pulse train and a negative voltage (V-) pulse train.



BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



противопоказания

- кардиостимулятор
- эпилепсия
- беременность
- онкология
- Тромбозы в анамнезе
- флебиты
- Под наблюдением врачей по поводу хронических заболеваний





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-nano™

bt-nano® позволяет специалисту использовать разнообразные аксессуары для увеличения предложений по процедурам для пациентов





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-nano™

bt-nano® позволяет вам проводить 5 разных экспресс процедур и это то что должны делать все пользователи


- bt-Cocktail® Lift
- Invisible Expression Lift™
- Platinum Touch Hand Service™
- Quickly Clear Facial™
- Specific Application




BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.




bt-Cocktail® Lift двухшаговый протокол по лицу который
состоит из нескольких этапов постановок и завершающего
нанесения продукта

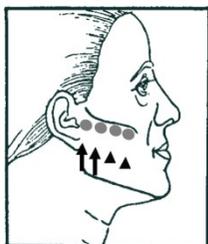

Массетер
нижняя часть

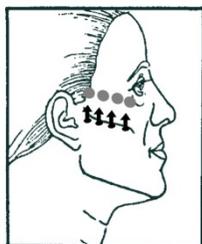

Массетер
верхняя часть

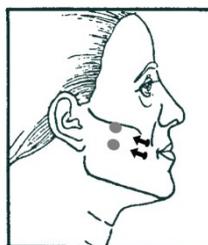

Ризориус
букцинатор



Зигоматикус
майор и
минор



корrugатор



BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.




растяжение:

Начальное давление идет из центра мышцы





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.

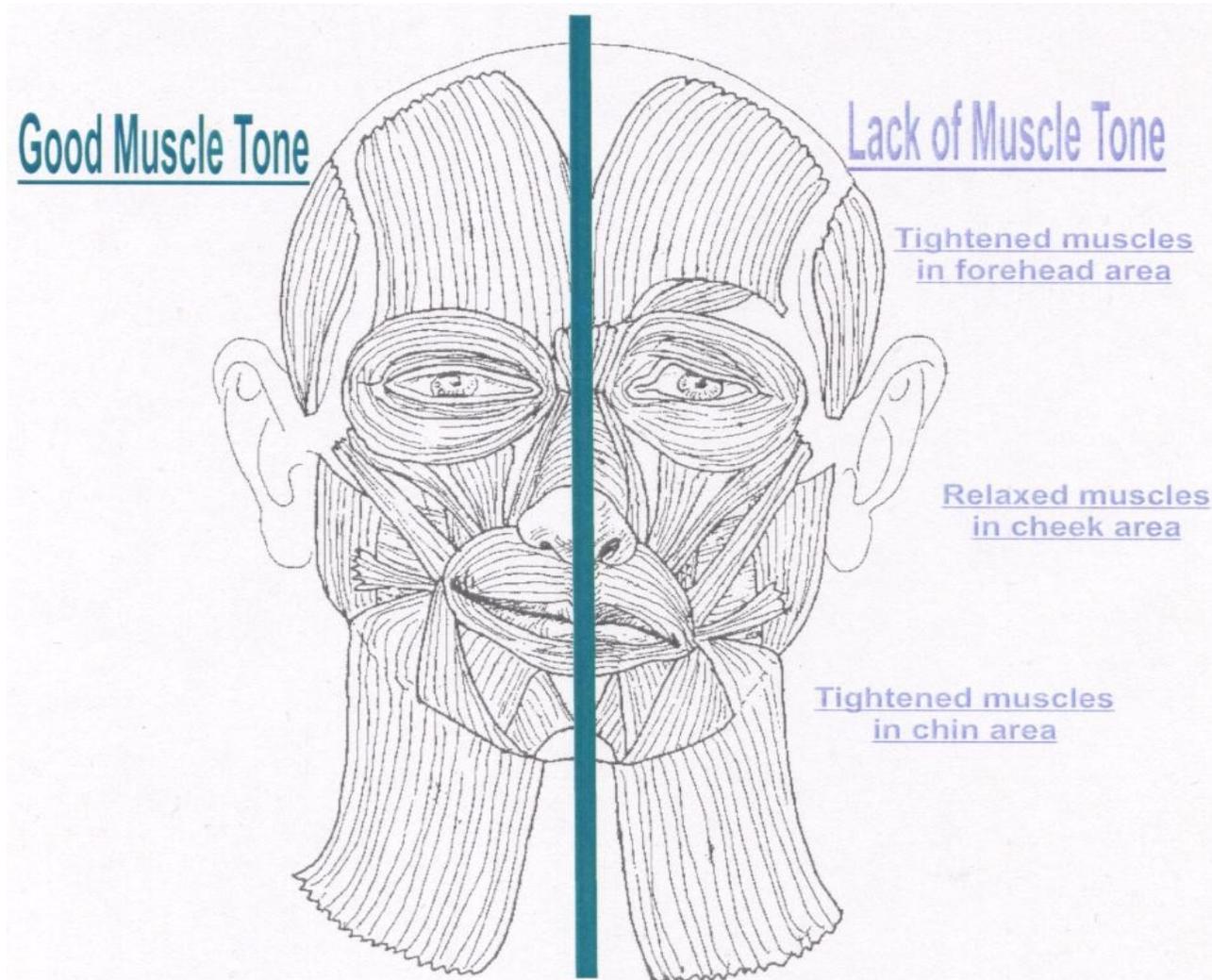



BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.




шаг 2 : работа с кожей – нанесение средства



bt
Cocktail

The Ultimate ATP Synthesis

Energy 1-2-3

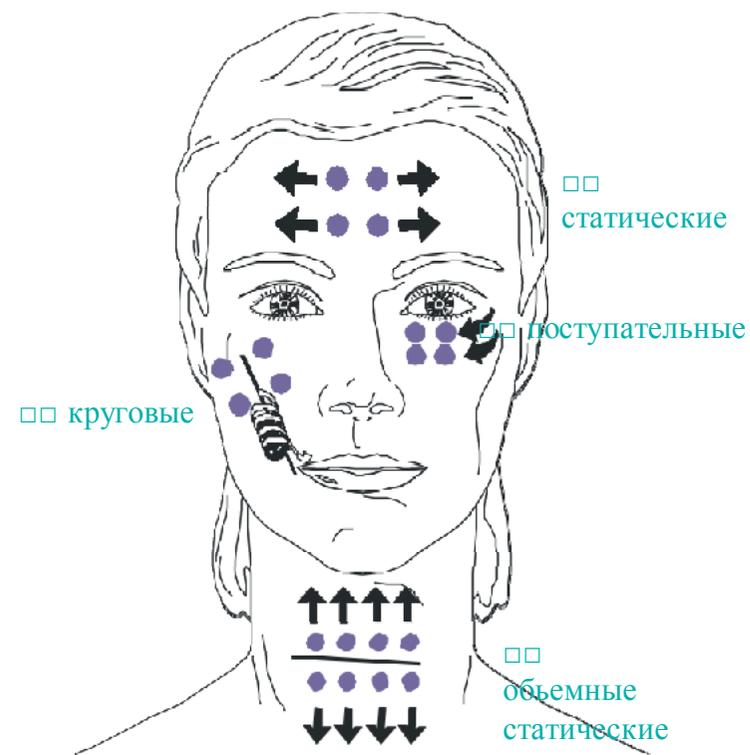



BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



Продукты для использования с bt-cocktail® lift

HYDRATE: для проведения, гиалуроновая кислота для увлажнения, экстракт листьев артишока и витамины A & D как антиоксиданты

Restyfluid: для скольжения движений во время процедуры, пальмитоилпентапептид для синтеза коллагена и гликозаминогликанов, витамины A, C, D, & E как антиоксиданты

bt-Cocktail®: для нанесения продуктов которые содержат АТФ (аденозинтрифосфат) и эрготионин как мощнейший антиоксидант





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-cocktail®: ПРОДУКТЫ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ О БУДУЩЕМ

- **ЮНИХОНДРИН АТФ-Е1, Е2 & Е3**

увеличение клеточного
метаболизма

- **эрготионин- Е1, Е2, & Е3**

“защита и доставка” в клетках

- **ликокалькон- Е1** осветление,
регулировка выделения себума

- **витацел- Е1 & Е2**

Улучшает оксигенацию и клеточное
дыхание

- **биодин 03- Е2**

100% защита озона

- **синтакс- Е3**

Стимулирует рост коллагена IV, VII &
XVII улучшает клеточную когезию в
DEJ(ламинин и интегрин,
фитоквинтесин)






BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.




The Invisible Expression Lift™
Трехшаговый протокол для параорбитальной зоны

ПОСТАНОВКИ

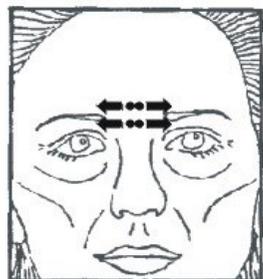

Corrugator
Procerus

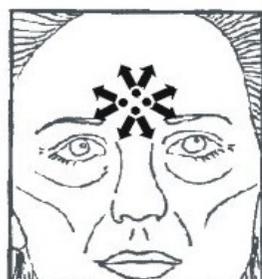


Corrugator
Procerus




Frontalis



Corrugator
Orbicularis
Oculi

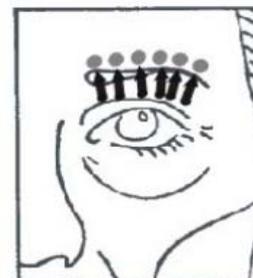

Orbicularis
Oculi

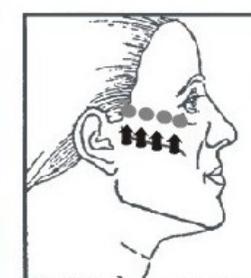

Upper
Masseter



BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



The Invisible Expression Lift™

ДВИЖЕНИЯ





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



The Invisible Expression Lift™

Нанесение
продукта при
помощи маски IE
Masque





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



Продукты для Invisible Expression Lift™

PLATINUM RELAXING SERUM

Ацетилоктапептид
Зуменьшает напряжение в мышцах

PLATINUM PEPTIDE SERUM

Пальмитоил трипептид-28-
противовоспалительный эффект,
блокировка гликации, для построения
пальмитоилолигопептид, моллекулы
коллагена

PLATINUM PEPTIDE CREAM

Фосфолипиды сои: уплотнение и тонизация
хлорела обычная: уменьшение гликации;
богата аминокислотами

PLATINUM RESTORE EYE CREAM

гиспередин метилалкон, уменьшает
проницаемость капилляров, уменьшает
отечность





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



The Platinum Touch Hand Treatment
™ двухшаговый протокол для
кистей рук





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



The Platinum Touch Hand Treatment TM

Эксфолиация с bt-micro®





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



The Platinum Touch Hand Treatment™

Нанесение продукта с Rejuvamits





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



Продукты для The Platinum Touch Hand Treatment™

EXFOLITE: протеолитические ферменты папаи и гранулы жожоба или AQUAfuse очищающая пена

bt-Cocktail®: содержит АТФ (аденозин трифосфат) и эрготионин как мощные антиоксиданты

или

Platinum Peptide Serum и Platinum Peptide Cream: для замедления процессов гликации, противовоспалительного и антиоксидантного эффектов





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



The Quickly Clear Facial TM
Трехшаговый протокол по лицу который обеспечивает
очистку смягчение и увлажнение





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



Продукты для Quickly Clear Facial™

- **DECONGEST**: для разрыхления кожи и подготовки к экстракции
- **RESTYFLUID**: для восстановления и насыщения тканей витаминами A,C,D & E
- **COLLAGEN & ELASTIN AMPOULE**: для увлажнения и восстановления





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



Специфические приложения позволяют специалистам составить максимально индивидуальную процедуру с использованием широкого спектра препаратов





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



bt-nano™

- КОМПАКТНОСТЬ
- Используют батареи – 9V для работы
- Аксессуары которые легко заменить от процедуры к процедуре
- Патентованная технология Suzuki Sequencing™
- 5 режимов процедур
- Можно использовать в любых условиях





BIO-THERAPEUTIC
skin care for life inside and out.



BEFORE

AFTER





BIO-THERAPEUTIC

skin care for life inside and out.



Суть бизнеса

- С bt-GEAR® у вас есть возможность работать в любых условиях предоставляя мобильные услуги
Будьте креативными!
- в зависимости от рынка стоимость на процедуру колеблется в пределах \$25-\$65, плюс добавочная стоимость на розничную продажу средств
- невысокая стартовая инвестиция, высокий уровень заработка



Louise Gray, R.N.